

PRESSMATIC®



**PRESSMATIC PM-24000D SET MIT 16-KAMMER-JACKE UND 8-KAMMER-HOCHHOSE MIT
FIR-THERMOTHERAPIE**

11 800 €

PRESSMATIC®

Opis



PRESSMATIC PM-24000D SET MIT 16-KAMMER-JACKE UND 8-KAMMER-HOSE MIT FIR-THERMOTHERAPIE

PRESSMATIC PM-24000D aus der Professional-Serie ist **ein** fortschrittliches **2-in-1-Gerät für die Pressotherapie**. Dank seines relativ kleinen, ergonomischen Gehäuses ist es bequem im täglichen Gebrauch. Das Gerät kann auf einem Wagen oder Schrank aufgestellt werden. Das Modell PM-24000D ist hauptsächlich für den professionellen Einsatz durch Kosmetiker, Masseur und Physiotherapeuten vorgesehen. Es verfügt über **eine digitale Steuerung**, die eine sehr präzise Auswahl der Massageparameter garantiert. Das Gerät ist mit 8-, 16- und 24-Kammer-Manschetten kompatibel. PRESSMATIC PM-24000D verfügt über **6 verschiedene Pressotherapie-Modi** zur Linderung von Lymphödemen, zur Gewichtsreduktion, zur Beseitigung von Cellulite sowie zur Verbesserung der Durchblutung. Es ermöglicht die Durchführung **einer FIR-Thermotherapie**, die bei Schlankheits- und Verjüngungsbehandlungen zum Einsatz kommt, die Durchblutung fördert und die Muskeln entspannt. Im Set enthalten ist auch **ein spezielles Augenmassagegerät**, das eine vollständige Entspannung während der Behandlung ermöglicht.

Opis

PRESSMATIC®

IM SET ENTHALTEN:

GRÖSSENVERSTELLBARE JACKE FÜR ARME, BRUST UND BAUCH


Im Lieferumfang des Geräts ist eine 16-Kammer-Jacke enthalten, die Arme, Brust und Bauch abdeckt und in der Größe verstellbar ist, sowie ein Satz Luftschläuche. Die Kompressionsjacke verfügt über Infrarotstrahler, sodass sie neben der Pressotherapie auch eine FIR-Thermotherapie-Funktion bietet. Dank **der dreifachen Verstellbarkeit** mit Reißverschlüssen eignet sich die Jacke für Personen mit unterschiedlichen Körperformen und sorgt für Komfort und Wirksamkeit der Therapie. Die Grafik zeigt die Umfänge und die Länge der Jacke vor dem Aufpumpen. Achten Sie darauf, dass die Umfänge der Jacke einige Zentimeter größer sind als Ihre Körperumfänge. **Anleitung: Wie wählt man die richtige Größe aus?** Haben Sie Zweifel bezüglich der Größe? Rufen Sie uns unter **+49 30 223 89119** an oder füllen Sie das obige Formular aus – unsere Berater helfen Ihnen gerne weiter.

Opis

IM SET ENTHALTEN:

GRÖSSENVERSTELLBARE HOSE FÜR BEINE, RUMPF UND OBERSCHENKEL

Im Lieferumfang des Geräts sind 8-Kammer-Hosen für Beine, Rumpf und Oberschenkel in verstellbarer Größe sowie ein Satz Luftschläuche enthalten. Die Kompressionshosen sind mit Infrarotstrahlern ausgestattet, sodass sie neben der Pressotherapie auch eine FIR-

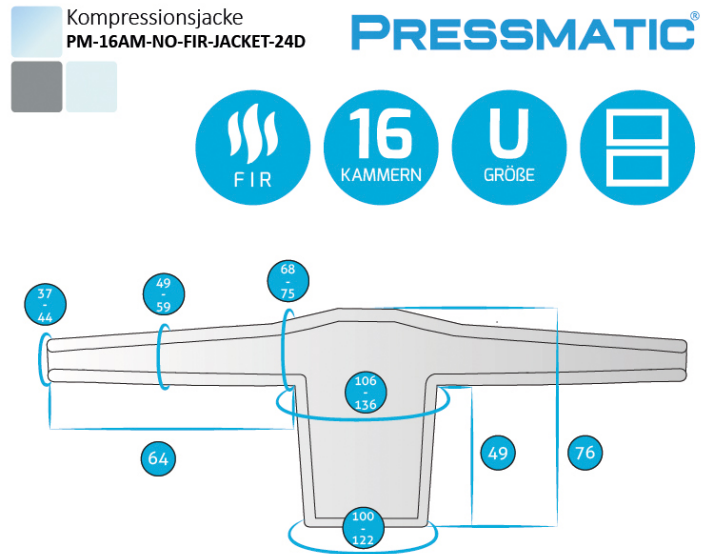

Kann gleichzeitig mit einer 8-Kammer-Hose verwendet werden

PRESSMATIC®


Thermotherapie-Funktion bieten. Dank **der dreifachen Verstellmöglichkeit** mit Reißverschlüssen eignet sich die Hose für Personen mit unterschiedlichen Körperformen und gewährleistet Komfort und Wirksamkeit der Therapie. Die Grafik zeigt den Umfang und die Länge der Hose vor dem Aufpumpen. Achten Sie darauf, dass der Umfang einige Zentimeter größer ist als Ihr Körperumfang.

Anleitung: Wie wählt man die richtige Größe aus? Sind Sie sich bezüglich der Größe unsicher?

Rufen Sie uns unter **600222888** an oder füllen Sie das obige Formular aus – unsere Berater helfen Ihnen gerne weiter.

Kompressionshose
PM-8LG-NO-NOFIR-HIGH-24D

PRESSMATIC®

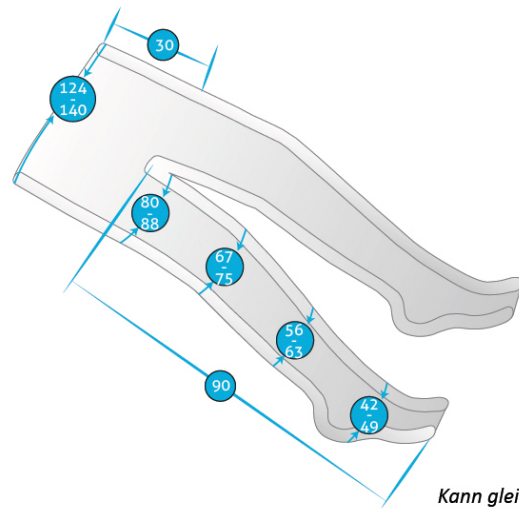

*Kann gleichzeitig mit einer
16-Kammer-Jacke
verwendet werden*

Opis



ENTSPANNUNGSMASSEGERÄT FÜR DIE AUGENUMGEBUNG

Das Pressotherapiegerät PRESSMATIC PM-24000D enthält ein Massagegerät für die Augenpartie **mit Vibrationsfunktion und Musikwiedergabe**. Das Massagegerät arbeitet nach dem Prinzip der rhythmischen Druckausübung. Es ist eine hervorragende Methode, um während der Behandlung vollständige Entspannung zu erreichen.

Opis

PRESSMATIC®



Modernes, fortschrittliches Modell für den professionellen Einsatz.



Eine leise und leistungsstarke Pumpe, die einen Druck im Bereich von 30 bis 294 mmHg erzeugt



2 w 1:
Pressotherapie und
FIR-Thermotherapie.



Die SKIP-Funktion ermöglicht das Deaktivieren ausgewählter Kammern, wenn eine Massage eines bestimmten Bereichs nicht möglich ist.



Ein übersichtliches, digital gesteuertes Touchscreen -Bedienfeld sorgt dafür, dass die Bedienung des Geräts sehr intuitiv ist.



Die FIR-Thermotherapie wirkt schlankmachend, unterstützt die Durchblutung und entspannt die Muskeln.



6 verschiedene Programme, u. a. für lymphatische Drainage, Entgiftung, Muskelentspannung und Verbesserung der Durchblutung.



Ein Augenmassagegerät ermöglicht eine vollständige Entspannung während der Behandlung.

Opis

PM-24000D – FÜR WEN EMPFOHLEN?

Das Pressotherapiegerät PRESSMATIC PM-24000D ist ein Modell für den professionellen Einsatz **in Kosmetik-, Physiotherapie- und Massagepraxen**. Es ist eines der fortschrittlichsten Geräte für die Lymphdrainage, die auf dem Markt erhältlich sind. PRESSMATIC PM-24000D wird von Privatanwendern selten gewählt, da es aufgrund der 24 Kammern, die die Pumpe bedient, recht groß ist. Dank verschiedener Programme ermöglicht es nicht nur eine sanfte Lymphdrainage, sondern auch eine Tiefenmassage, die auf die Muskeln wirkt. Zusätzlich verbessert die FIR-Thermotherapie die Durchblutung, entgiftet und entspannt die Muskeln. Aus diesem Grund eignet sich das PRESSMATIC PM-24000D hervorragend **für Sportler** und



PRESSMATIC®

Menschen, die unter schweren, müden Beinen leiden. Das Lymphdrainagegerät PRESSMATIC PM-24000D verfügt außerdem über ein spezielles, stark entgiftendes Programm, das **die Gewichtsabnahme erleichtert und Cellulite beseitigt**. Dank des entspannenden Massagegeräts für die Augenpartie eignet sich PRESSMATIC PM-24000D perfekt für SPA- und Wellness-Salons.

Opis

FIR-THERMOTHERAPIE

Das Lymphdrainagegerät PRESSMATIC PM-24000D verfügt über eine FIR-Thermotherapie-Funktion, d. h. **eine Funktion zum Erwärmen des Gewebes** in jeder Manschette. Dabei handelt es sich um eine Behandlung mit Infrarotlicht, das Energie in tieferen Geweben wie der Dermis, dem Fettgewebe und den Muskeln speichert, deren Temperatur erhöht und gleichzeitig nur eine geringfügige Erwärmung der Epidermis bewirkt. Die FIR-Thermotherapie erweitert die Blutgefäße, beschleunigt den Stoffwechsel und verbessert so die Sauerstoffversorgung und Ernährung der Zellen. Unter dem Einfluss einer leichten Temperaturerhöhung in der Dermis kommt es zu **einem** sogenannten **Thermolifting**, d. h. einer Verkürzung der Kollagenfasern. Die Haut wird dichter, straffer und verjüngt. Neben den kosmetischen Effekten eignet sich die Thermotherapie hervorragend zur Anregung der Durchblutung und zur Entspannung der Muskeln.

Specyfikacja

Parameter	Wert
Drucksteuerungssystem	digital
Anzahl der unterstützten Kammern in Manschetten	24
Gewicht des Geräts	10 kg
Verwendungszweck	für Kosmetikerinnen
Anzahl der Druckprogramme	6
Maximaler Druck	360 mmHg
„SKIP“-Funktion	✓
FIR-Funktion	✓

PRESSMATIC[®]

Parameter	Wert
Augenmassagegerät Abmessungen des Geräts	✓ 40 x 29 x 45 cm